

NOTICE D'UTILISATION : PIED A SERUM 211047

Le Pied à Sérum 211047 est équipée de 4 crochets sécurité chromés FIXES et d'une base de 5 pieds ABS pour une excellente stabilité. Ses roulettes permettent un déplacement aisé. Son système d'assemblage permet un démontage de la tige en 1 clic. Son assemblage ne nécessite aucun outil autre que ceux fournis. Lire attentivement les instructions et les mises en garde avant toute utilisation. Conservez cette notice le temps d'utilisation du produit.

Caractéristiques techniques :

- Hauteur réglable sol / crochet : 132 à 212 cm
- Tige coulissante et fût en acier chromé .
- Diamètre fût : 2,4 cm / diamètre tige coulissante : 1,9 cm
- 4 crochets sécurité en acier chromé
- Base 5 pieds en ABS injecté / empattement 58,5 cm
- Roulette double galet de diamètre 51 mm
- Poids net : 3,75 kg

Pièces et instructions d'assemblage :

Le pied à sérum est livré en plusieurs parties : La tige et son fut, la base du pied munie de 5 roulettes, 4 crochets.



- Fixer la tige sur la base pied en appuyant sur le bouton du bas pour glisser le pied dans son emplacement
- Pour retirer la tige, appuyer sur le bouton du haut.
- Poser l'ensemble au sol et s'assurer de la stabilité .

Recommandations :

- Avant chaque utilisation, vérifier que les 5 roulettes sont bien emboîtées pour assurer la stabilité du pied .
- Avant d'accrocher une poche, régler la hauteur des crochets et visser la molette de serrage.
- Ne pas accrocher autre chose que des poches sur le pied à sérum , qui n'est pas destiné à d'autre usage.
- Chaque crochet ne doit recevoir qu'une seule poche.
- Le pied à sérum ne peut être bougé qu'en le prenant pas son fut,
- Ne jamais tirer sur les perfuseurs accrochés pour faire bouger le pied à sérum



Entretien régulier :

- Essuyer le pied à sérum avec un chiffon doux après chaque utilisation
- Eliminer systématiquement les salissures en utilisant une solution savonneuse suivie d'un séchage
- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou à base d'Eau de Javel qui peuvent endommager ou de décolorer le produit
- Vérifier et nettoyer régulièrement les 5 roulettes pour conserver une bonne mobilité.
- Seul un technicien habilité peut procéder au remplacement de pièces fournies par MEDICAL CENTER.

Conditions de garantie :

Le produit est garanti un an, dans le cadre d'une utilisation normale. Cette garantie exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas à un matériel réparé ou modifié sans l'accord de MEDICAL CENTER.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages ou intérêts directs ou indirects.



Fabriqué par les Laboratoires [Euromedis](#)

Distribué par MEDICAL CENTER

12 rue Pierre Bray – 60290 NEUILLY SOUS CLERMONT

Tél : 03 44 73 83 54

Fabriqué à TAIWAN

